



1) Legen Sie vor der Sterilisation je einen Teststreifen in jedes zu sterilisierende Päckchen ein und stellen Sie sicher, dass der Streifen vollständig eingeschlossen ist.

2) Überprüfen Sie nach erfolgter Sterilisation die Farbe der beiden aufeinander zeigenden Pfeile; sind sie genauso dunkel oder dunkler wie der dicke Referenzpfeil am linken Rand, war der Sterilisiervorgang erfolgreich, und die Instrumente sind sicher für die nächste Verwendung.

Bitte beachten: Bei diesen Teststreifen handelt es sich um Behandlungsindikatoren. Diese sagen nur aus, dass sterilisiert wurde. Im Gegenzug zu Prozessindikatoren kann nicht nachgewiesen werden, ob bei richtiger Beladung die Verpackungen steril sind!